

Las causas más frecuentes de la impotencia y los trastornos de la erección son:

- Diabetes
- Hipertensión y enfermedades cardiovasculares
- Operaciones de la próstata
- Enfermedades vasculares (arterioesclerosis)
- Infarto de miocardio y accidente cerebrovascular
- Valores elevados de lípidos en sangre
- Depresiones u otros trastornos psicológicos
- Enfermedades neurológicas (p. ej. esclerosis múltiple, paroplejia)
- Enfermedades vasculares de los cuerpos cavernosos del pene
- Insuficiencia renal o hepática
- Medicamentos (p. ej. para la hipertensión, los trastornos del ritmo cardiaco, reductores de los lípidos en sangre, medicamentos antiinflamatorios, antidepressivos y diuréticos)
- Fumar
- Consumo excesivo de alcohol

Solución: para estas enfermedades, la terapia de vacío constituye una alternativa eficiente al tratamiento medicamentoso, sin apenas efectos adversos y fácil de utilizar.

Sistema de vacío para la erección en casos de disfunción eréctil (impotencia)

La terapia de vacío no se debe utilizar en caso de:

- Anemia de células falciformes
- Leucemia
- Tumores de médula ósea

La terapia de vacío solo se debe utilizar después de consultarlo con su médico, si padece:

- trastornos graves de la coagulación de la sangre

Si no está seguro, consulte a su médico o llámenos.

Información para pedidos

ACTIVE *Erection System*^{NT}®



EAN: 4013273000116
N.º art. AES 01

CE 0483
Producto sanitario

MANUAL *Erection System*®



EAN: 4013273001175
N.º art. MES 01

CE
Producto sanitario



KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
www.medintim.de

Tel. 06105 20 37 20
Fax 06105 45 59 01
E-Mail: service@medintim.de

AES/NTMES | 20.12.2016

www.medintim.de


MEDintim
personal healthcare

Terapia de vacío para la disfunción eréctil (impotencia)


ACTIVE *Erection System*^{NT}®
MANUAL *Erection System*®






Utilización

El sistema **ACTIVE Erection System^{NT}** y el **MANUAL Erection System[®]** son dispositivos médicos auxiliares para aplicar la terapia de vacío en casos de disfunción eréctil (impotencia). En la terapia de vacío, la erección se consigue con una presión negativa. La bomba de vacío genera una presión negativa o vacío en el cilindro que rodea al pene.

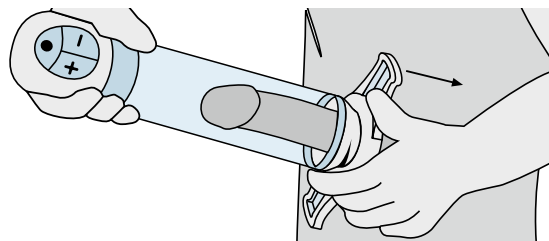

Primero se coloca el cilindro alrededor del pene y después de iniciar la operación de bombeo. Mediante el vacío así generado, la sangre fluye con más intensidad a los cuerpos cavernosos. Esto da lugar a la erección o rigidez del miembro. A continuación, se coloca un anillo constrictor sobre el cuerpo del pene. El anillo evita que la sangre fluya fuera del pene al retirar el cilindro, manteniendo la erección. La erección mantenida de

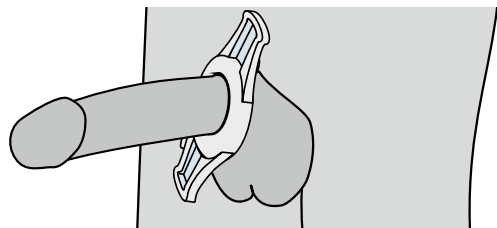

esta forma permite tener relaciones sexuales normales y satisfactorias. El anillo constrictor no se debe utilizar durante más de 30 minutos sin interrupción.

ACTIVE Erection System^{NT}



MANUAL Erection System[®]



ACTIVE Erection System^{NT} consta de:

- cilindro transparente (diámetro interno 53 mm, longitud 202 mm)
- **bomba de vacío eléctrica con tres pilas AAA (Mignon)**
- collarín guía 1 y 2
- cono (para deslizar el anillo constrictor)
- 4 anillos constrictores diferentes (diámetro interno de 10/12,5/15 y 20 mm)
- frasco de 50 ml de lubricante Animé
- instrucciones de uso
- DVD con las instrucciones de uso e imágenes explicativas
- bolsa para guardar el producto

Garantía de 2 años para el cabezal de la bomba.

Diferencias entre ACTIVE Erection System^{NT} y MANUAL Erection System[®]

La diferencia más importante entre los dos sistemas es que el sistema **MANUAL Erection System[®]** es más silencioso (discreto) y genera una presión superior de forma más rápida. Por el contrario, el **ACTIVE Erection System^{NT}** es más cómodo de usar.

Observación: el **MANUAL Erection System[®]** es la solución más efectiva después de una operación de próstata.

Ambos dispositivos son compatibles entre sí, es decir, el cabezal de la bomba también encaja en el cilindro del otro sistema.

Ambos dispositivos son productos médicos certificados de alta calidad fabricados en Alemania. Después de la adquisición tendrá a su disposición piezas de recambio y el asesoramiento que necesite en todo momento.

Fabricado en Alemania

MANUAL Erection System[®] consta de:

- cilindro transparente (diámetro interno 53 mm, longitud 202 mm)
- **bomba de vacío manual**
- collarín guía 1 y 2
- cono (para deslizar el anillo constrictor)
- 4 anillos constrictores diferentes (diámetro interno de 10/12,5/15 y 20 mm)
- frasco de 50 ml de lubricante Animé
- instrucciones de uso
- DVD con las instrucciones de uso e imágenes instrucciones de uso
- bolsa para guardar el producto

Garantía de 2 años para el cabezal de la bomba.

Ventajas

- restablecimiento de la función eréctil
- mejora significativa de los resultados (riesgo sanguíneo), por ejemplo, después de una operación de próstata
- no tiene efectos adversos conocidos
- si se desea, se puede utilizar a menudo y durante muchos años
- económico
- no presenta interacciones con ningún medicamento
- de uso fácil y seguro
- el médico lo puede recetar como dispositivo auxiliar reembolsableverordnet werden