

Caya® se adapta a usted.

El Diafragma Caya® es el método anticonceptivo de las mujeres que buscan una protección natural y segura.

El diafragma está **especialmente** indicado para las mujeres:

- que quieren o deben usar un método anticonceptivo sin hormonas (p. ej. en caso de riesgo alto de trombosis)
- que no quieren o no deben usar la espiral
- que se encuentran en el periodo de lactancia
- que sólo desean usar un método anticonceptivo cuando mantienen relaciones sexuales
- después del parto / entre dos embarazos
- alérgicas al látex
- en combinación con métodos de la planificación familiar natural (p. ej. el método sintotérmico)

Contraindicaciones:

- En las 6 semanas posteriores al parto
- En caso de fuerte descenso del suelo pélvico/útero
- Si se ha utilizado un diafragma convencional de 60 mm o menos, o de 85 mm o más

Nota:

Caya® no protege de enfermedades de transmisión sexual. El Diafragma Caya® se compra sin receta en la farmacia. Se recomienda usar el Diafragma Caya® siempre en combinación con el Gel Caya® anticonceptivo.

Ventajas del Diafragma Caya®

- Sin hormonas
- Uso sencillo, similar al de un tampón
- Sin efectos secundarios
- Reutilizable: 2 años
- Sin látex
- No requiere adaptaciones
- Ecológico y económico
- No afecta a las sensaciones sexuales de la pareja
- Sólo se usa cuando se necesita
- En combinación con el gel anticonceptivo ofrece **triple seguridad:**
 - membrana de silicona como barrera mecánica
 - celulosa en el gel anticonceptivo como barrera mecánica adicional
 - el pH ácido (3,8) y la viscosidad del gel anticonceptivo inhiben la motilidad de los espermatozoides

Junto con el Diafragma Caya® Usted recibe:

- un manual de instrucciones
- un DVD
- Un estuche para guardar el diafragma



Caya® *contoured diaphragm*

PZN 09224698
Precio: 37,95€ PVR



Caya® *diaphragm gel*

PZN 02950119
Precio: 9,95€ PVR



De venta en farmacias, comercios especializados o directamente en www.medintim-shop.de



Caya® *contoured diaphragm*

Sin hormonas.
Seguro.
Fácil de usar.



KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Alemania
www.medintim.de

Más
información en
www.caya.eu




0483
Producto sanitario

Teléfono de atención al cliente:
+49 6105-203720

Caya® *contoured diaphragm*

Protección anticonceptiva con el Diafragma Caya®

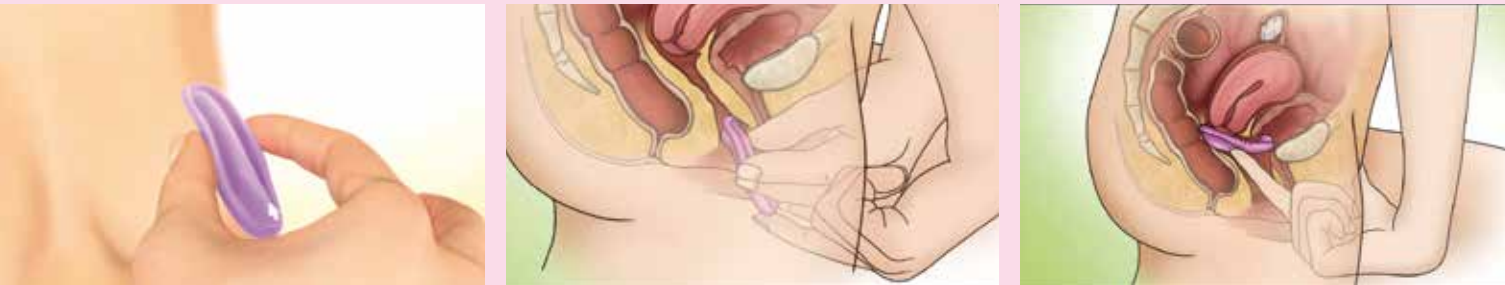

Muchas mujeres desean un método anticonceptivo natural, seguro y sin hormonas!

Con el nuevo Diafragma **Caya®** usted previene el embarazo con seguridad y decide cuándo lo utiliza. **Caya®** se introduce en la vagina como un tampón antes de mantener relaciones sexuales. El diafragma cubre por completo el cuello uterino y se sitúa entre el fondo de saco vaginal posterior y el pubis. **Caya®** impide que los espermatozoides lleguen al útero durante y después de las relaciones sexuales. Después de las relaciones sexuales, el Diafragma **Caya®** debe permanecer durante o al menos 6 horas en la vagina.

Encontrará más información y un video sobre su uso en: www.caya.eu

Triple seguridad con Caya®

El Diafragma Caya® y el Gel Caya® garantizan seguridad:

- La membrana de silicona es la barrera mecánica justo delante del cuello uterino. El firme borde del Diafragma **Caya®** cubre de modo seguro el cuello uterino.
- El Gel anticonceptivo **Caya®** contiene, entre otros componentes, celulosa que ofrece una barrera mecánica adicional directamente en el cuello uterino.
- El Gel **Caya®** contiene ácido láctico, por lo que su pH es ácido y actúa desactivando los espermatozoides.


Al mismo tiempo, este pH ácido tiene un efecto positivo sobre la flora vaginal y protege contra infecciones vaginales.

La seguridad, el uso sencillo y la comodidad de utilización de **Caya®** han quedado demostrados en estudios clínicos.¹⁻⁴

Cuál es la novedad: ¡la forma anatómica!

El Diafragma Caya® es un nuevo método anticonceptivo de barrera.

Su forma es anatómica y ergonómica, por eso es idóneo para la mayoría de las mujeres.

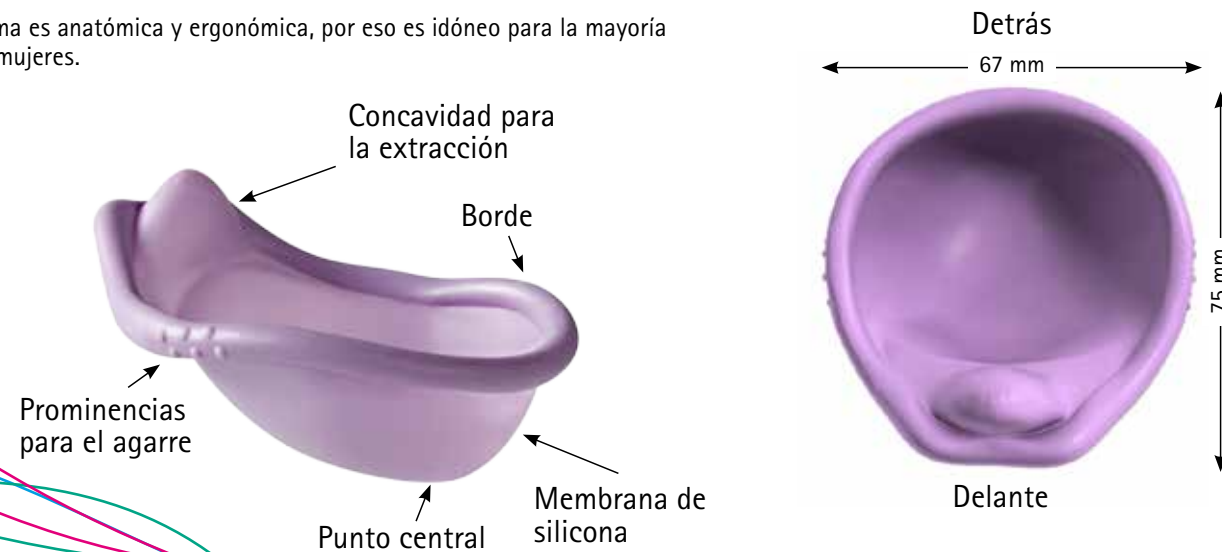

- **Membrana de silicona:** muy fina, cubre el cuello uterino por completo. No se siente durante las relaciones sexuales.
- **Borde:** Flexible, dota de estabilidad al diafragma y facilita su introducción en la vagina. El borde proporciona estabilidad y asegura la colocación correcta del diafragma.
- **Prominencias para el agarre:** ayudan a la orientación durante la introducción. El diafragma se dobla por aquí apretando ligeramente con los dedos.
- **Concavidad para la extracción:** facilita la extracción del diafragma de la vagina.
- **Punto central:** punto palpable para mejor colocación del diafragma.

Caya®



Bibliografía:

- 1 Yang CC, Maravilla K, Kilbourne-Brook M, Austin G, et al. Magnetic resonance imaging of SILCS diaphragm: anatomical consideration and corroboration with clinical fit. *Contraception* 2007; 76:238-244
- 2 Schwartz J, Ballagh S, Creinin M, et al. SILCS diaphragm: postcoital testing of a new single-size contraceptive device. *Contraception* 2008; 78:237-244
- 3 Coffey P, Kilbourne-Brook M, Brache V, Cochón L, et al. Comparative acceptability of the SILCS and Ortho ALL-FLEX® diaphragms among couples in the Dominican Republic. *Contraception* 2008; 78:418-423
- 4 Coffey P, Kilbourne-Brook M, Beksinska M, Thongkrajai E, et al. Short-term acceptability of a single-size diaphragm among couples in South Africa and Thailand. *J Fam Plann Reprod Health Care* 2008;34(4):233-236 *Contraception* 2004; 69:263-266.